



Ophardt ingo-man classic Desinfektionspender, 1000 ml, für Euroflaschen, Aluminiumabdeckung, kurzer Armhebel

Artikelnummer: A-25517

Seifen- und Desinfektionsmittelpender 1000 ml

Mit langem Hebel und austauschbarer Edelstahl Pumpe.

gerade Saugpumpe

Wird Standard mit Nachfüllbehälter geliefert.

Autoklavierbar.

Abmessungen: H 287 x B 94 x T 92 mm.

geeignet für Euroflaschen

mit Aluminiumgehäuse

benötigter Platz oberhalb des Spenders: ca. 40 mm


benötigter Platz unterhalb des Spenders: ca. 200 mm

Spendermontage: Behälter leicht anheben und aus dem Spender nehmen. Verriegelungszunge andrücken, Wandhalter nach unten vom Gehäuse abziehen. Mit beiliegenden Dübeln und Schrauben Wandhalter befestigen. Spender aufschieben, bis Verriegelungszunge einrastet.

Bei Bedarf lässt sich die Dosierung von 1,5 ml/Hub stufenweise durch Drehen des Dosierrades nach rechts und links bis auf ca. 0,5 ml/Hub reduzieren.

Gefüllten Behälter von unten in den Spender einsetzen.

Für die Reinigung wird ausschliesslich warmes Seifenwasser empfohlen.

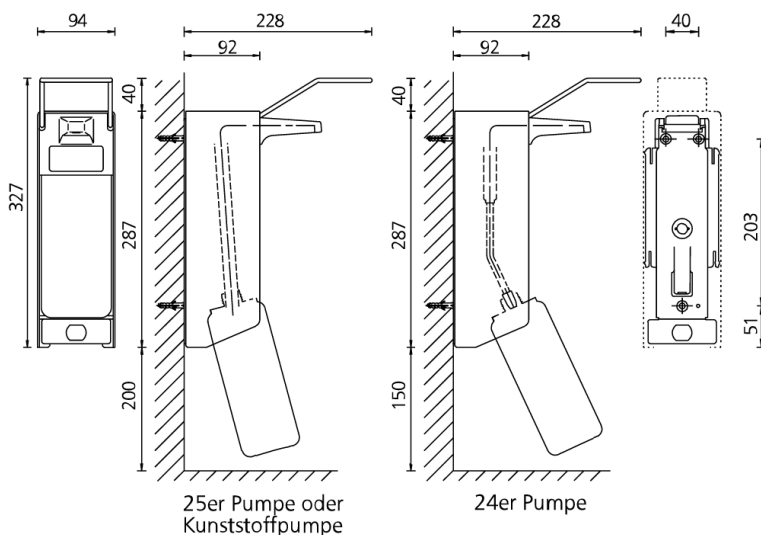



Distributeur de désinfectant Ophardt ingo-man classic, 1000 ml, pour flacons Euro, couvercle en aluminium, levier court

Réf. A-25517

Distributeur de savon et de désinfectant 1000 ml

Avec levier long et pompe en acier inoxydable remplaçable.

Pompe à aspiration droite

Livré en standard avec un récipient de recharge.

Autoclavable.

Dimensions : H 287 x L 94 x P 92 mm.

Convient pour les flacons Euro

Avec boîtier en aluminium

Espace nécessaire au-dessus du distributeur : env. 40 mm

Espace nécessaire sous le distributeur : env. 200 mm

Montage du distributeur : soulever légèrement le réservoir et le retirer du distributeur. Appuyer sur la languette de verrouillage, retirer le support mural du boîtier en le tirant vers le bas. Fixer le support mural à l'aide des chevilles et des vis fournies. Enfoncer le distributeur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.

Si nécessaire, le dosage de 1,5 ml/pression peut être réduit progressivement jusqu'à environ 0,5 ml/pression en tournant la molette de dosage vers la droite et vers la gauche.

Insérer le récipient rempli dans le distributeur par le bas.

Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser exclusivement de l'eau savonneuse chaude.

